



溜めっ子ベルト取り付け説明書

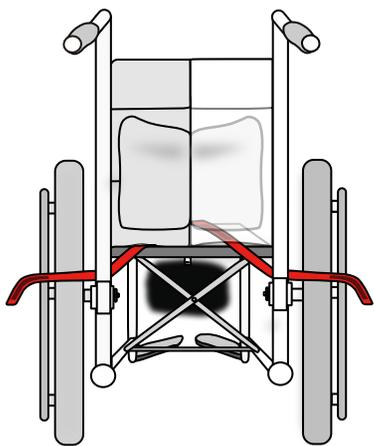


【説明1】

- ① 車いすのシートとバックレストの隙間から溜めっ子ベルトを通します。
- ② 車いすの縦フレームの内側を通し縦フレームと後輪の間から後ろに持ってきます。

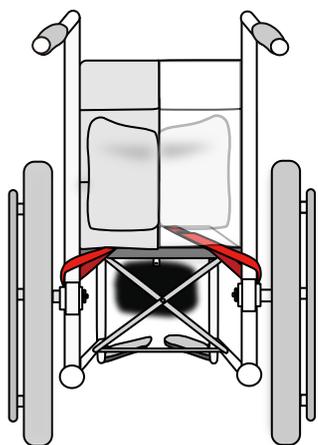

【説明2】

- ① 車いすの縦フレームに溜めっ子ベルトを回し、シートとバックレストの隙間から前方に戻します。

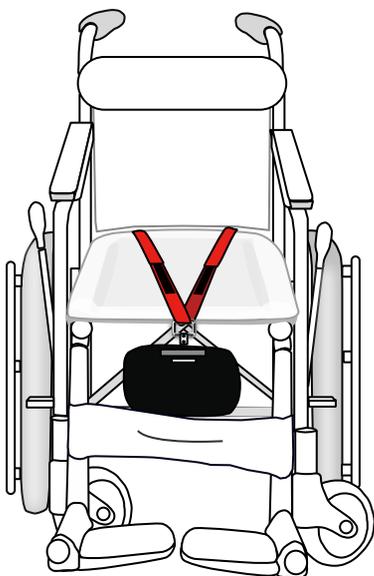

【説明3】

- ① 溜めっ子ベルト先端に付いている金具がシートの先端に垂れ下がる来る長さを調節してマジックテープを貼り合わせます。
- (注) 溜めっ子ベルトにゆがみやたわみがあると、縦フレームにまわしたベルトが後輪に接触して思わぬ事故に繋がる恐れがあります。

【説明4】

- ① 溜めっ子ベルト先端に付いている金具に、他社製の畜尿袋に付属しているベルトでぶら下げます。
(注意) 他社製のベルトが原因で畜尿袋が落下した場合、一切責任を負えません。使用前にご自身で破損等のご確認をして下さい。
- ② 溜めっ子ベルトに畜尿袋を架ける際に、畜尿袋から出ているホースも折れ曲がらないように円を描くような感じに束ね一緒にぶら下げて下さい。